

Snabbguide

SIEMENS

DCA Vantage™
Analysator

Hemoglobin A_{1c}

För kvantitativ mätning av
koncentrationen av hemoglobin A_{1c} i blod.

STEG
1

Ta ett blodprov

1. **Doppa** spetsen på kapillärhållaren i en liten droppe blod tills kapillärhållaren är fylld.



STEG
2

Rengöra kapillärroret

1. **Torka** sidan av kapillärroret med en servett.



STEG
3

Sätta i kapillärhållaren

1. **För in** kapillärhållaren i en kassetten (platta sidan mot kassetten) tills hållaren låses fast.



STEG
4

Läsa av kassetten

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **För in** kassetten i streckkodsskåran över pricken.
3. **Skjut** reagenskassetten snabbt och försiktigt nedåt. Ett **pip** och ett förändrat utseende på skärmen innebär en lyckad avläsning. Upprepa om det inte lyckas.



Fortsätter på motstående sida

Snabbguide

STEG
5

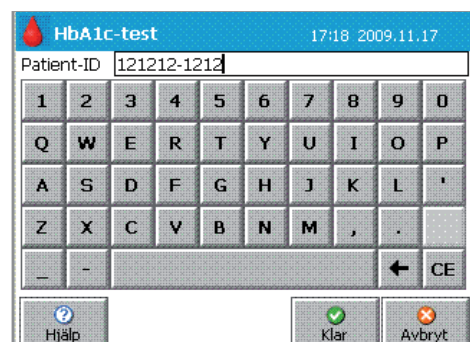
Sätta i kassetten

1. Håll kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. Öppna luckan och för in kassetten i facket tills ett klick hörs.
3. Dra loss fliken sakta och med fast hand.
4. Stäng luckan, så påbörjas analysen.

STEG
6

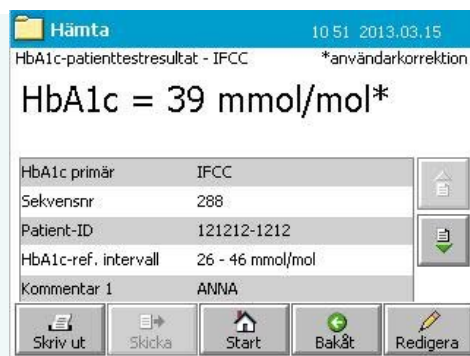
Registrera Patient ID

1. Välj Patient ID
2. Skriv in Patient ID
3. Tryck på klar
4. Tryck på nästa

STEG
7

Skriva ut resultaten

1. Vänta tills analysen är slutförd (ungefär 6 minuter).
2. Skriv ut resultaten från skärmen.

STEG
8

Ta ur kassetten

1. Tryck ned knappen på höger sida.
2. Med vänster hand trycker du fliken på kassetten till höger så att den låses upp.
3. Dra ut kassetten.
4. Kassera kassetten för att förhindra skada eller eventuell kontamination.

