

Snabbguide

STEG

1**Ta ett urinprov**

Doppa spetsen på kapillärröret i urinprovet till en nivå precis ovanför stärkelsepluggen.



STEG

2**Rengöra kapillärröret**

Torka sidan av kapillärröret med en servett.



STEG

3**Sätta i kapillärhållaren**

För in kapillärhållaren i en kasset (platta sidan mot kassetten) tills hållaren låses fast.



STEG

4**Läsa av kassetten**

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **För in** kassetten i streckkodsskåran över pricken.
3. **Skjut** kassetten snabbt och försiktigt nedåt. Ett **pip** och ett förändrat utseende på skärmen innebär en lyckad avläsning. Upprepa om det inte lyckas.



Snabbguide

STEG
5

Sätta i kassetten

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **Öppna** luckan och **för in** kassetten i facket tills ett klick hörs.
3. **Tryck ned** pistongen i kassetten.
4. **Dra** loss fliken sakta och med fast hand.
5. **Stäng** luckan, så påbörjas analysen.

STEG
6

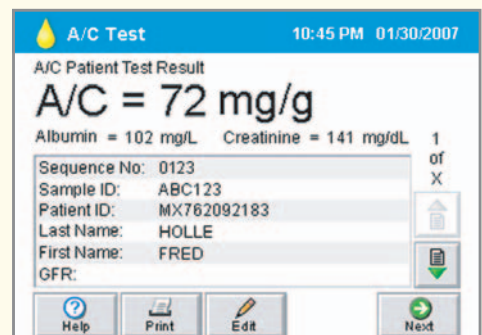
Registrera Patient ID

1. **Välj** Patient ID
2. **Skriv in** Patient ID
3. **Tryck** på ange
4. **Tryck** på nästa

STEG
7

Skriva ut resultaten

1. **Vänta** tills testet är slutfört (ungefär 7 minuter).
2. **Skriv ut** resultaten från skärmen.

STEG
8

Ta ur kassetten

1. **Tryck ned** knappen på höger sida.
2. Med vänster hand **trycker** du fliken på kassetten till höger så att den låses upp.
3. **Dra** ut kassetten.
4. **Kassera** kassetten för att förhindra skada eller eventuell kontamination.

