

## Byte av blododlingsflaskor från glas till plast

Klinisk Mikrobiologi kommer under hösten att övergå från glasflaskor till [blododlingsflaskor i plast](#). Gäller aerob-, anaerob- och PED-flaskor.

**Observera** att det är en ny färgkod för den anaeroba flaskan.



Aerob-, anaerob- samt PED-flaska i plast

Flaskorna ser likadana ut i plast som i glas men är mindre och lättare.

Provtagning sker som tidigare men var observant på hur mycket blod som fylls i flaskan.


Viktigt att volymen 8-10 mL inte under- eller överstigs för ett korrekt odlingsresultat.

Volymstrecken ligger tätare på plastflaskorna, se bild:

Provvolum: 8-10mL blod per flaska. (1-3mL till PED)

### **OBS!**

Flaskorna drar mer än så om inte provtagningen avbryts.

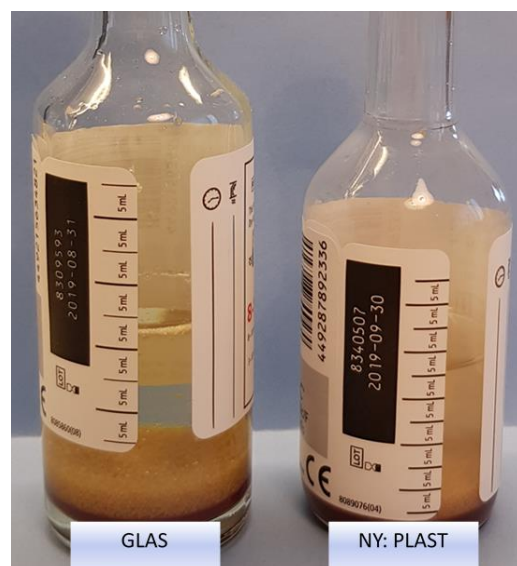

**De nya blododlingsflaskorna i plast kan tyvärr inte skickas i rörposten !!!**

Gå gärna in på provtagningsanvisningarna för att läsa på mer om provtagningen för blododling.

Vid frågor rörande provtagning eller önskemål om utbildning i provtagning, kontakta oss på laboratoriet via vår laboratorieinstruktör Elin Johansson som nås på [elin.a.johansson@regionvasterbotten.se](mailto:elin.a.johansson@regionvasterbotten.se) eller via vår växel på 090-785 11 25.