



Analyz F. O. B Test

UTFÖRANDE av F.O.B Test / Test för dolt blod i avföring Testet skall aldrig utföras på synligt blod


PROVINSAMLING

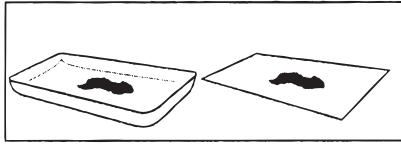


1 Fånga upp lite avföring direkt på toalettpapper, eller lägg lite toalettpapper i toaletten för att samla avföring på.

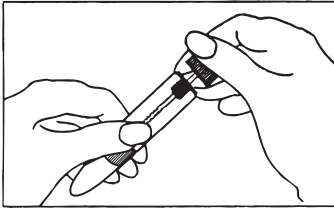


2 Skruva av den BLÅ korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Den vita änden ska förbli orörd.

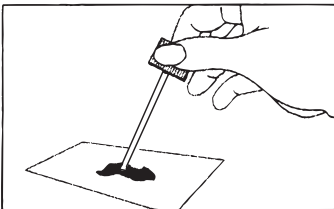

3 Stoppa den BLÅ provpinnens ände på flera olika ställen av avföringen.

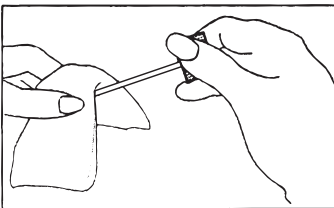


4 Torka bort överflöd av avföring från provpinnen genom att försiktigt stryka mot toalettpapper.

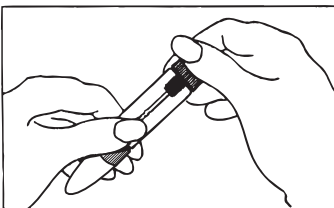


5 Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.

6 Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagning.


TESTUTFÖRANDE

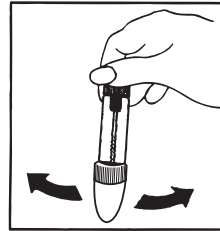

1 Skaka röret kraftigt för att blanda vätskelösningen.

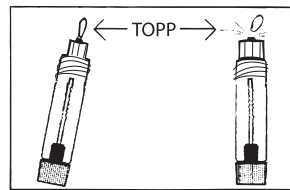

2 Håll röret rakt upp, skruva av den vita skyddshylsan och bryt av toppen.

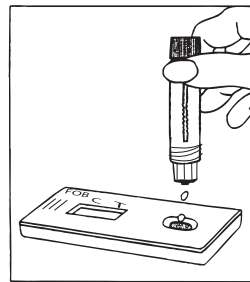


3 Droppa **3 droppar** av lösningen i provbrunnen.


4 Läs resultatet vid **5** minuter. **OBS! Läs aldrig senare än 5 minuter!**

**Provet är nu klart för test och kan förvaras i rumstemperatur.
Provet ska testas inom 7 dagar från provtagning.**


AVLÄSNING AV TEST

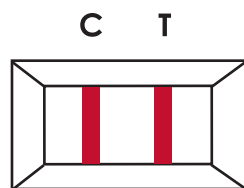

POSITIV

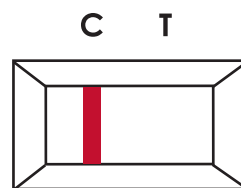

NEGATIV

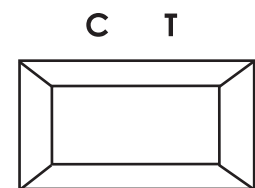

OGILTIG

