



Innehåll:

- | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|
| Sid 2 | Patientnära analyser
PNA | PNA-Kemi <ul style="list-style-type: none">- Informationer från PNA gruppen Kemi |
| Sid 3 | Biobanken norr | <ul style="list-style-type: none">- Öppettider för mottagning av prov via rörpost |
| Sid 4 | Blodcentralen | <ul style="list-style-type: none">- Beställningar av blodkomponenter |
| Sid 5 | Klinisk genetik | <ul style="list-style-type: none">- Benmärgsprover för kromosomanalys |
| Sid 6 | Klinisk immunologi | <ul style="list-style-type: none">- Analys av anti-titin läggs ner |

Nytt graviditetstest

Art.nr 7632, Acro U-hCG Graviditetstest kassett

Användarutbildning

P.g.a. nytt handhavande rekommenderas att all personal, som ska använda testet, går igenom det utbildningsmaterial som finns på Lärande Region. Behövs ytterligare stöd, kontakta PNA-gruppen.

Ni hittar utbildningen här: "Graviditetstest med Acro hCG kassett"

www.laranderegion.se/course/view.php?id=525

Kvalitetssäkring

Intern kontroll: 2 nivåer (pos/neg), ska göras vid mottagande av nya kassetter.

Om förpackningar med olika LOT-nummer levereras görs separata kontroller för varje LOT-nummer.

Observera att kontroller bara behöver göras med 1x pos och 1x neg per LOT-nummer och inte för varje förpackning om alla förpackningar, som levererats, har samma LOT-nummer.

Kontrollvätskorna till graviditetstestet är samma som till urinstickor.

Art.nr 6044, Kontroll urinsticka (Liquid QC)

Kontakta PNA-gruppen när ni börjat använda de nya kassetterna.

- ✓ Om ni redan använder kontrollprogrammet för hCG-kontroller, sedan tidigare, kan ni meddela detta i form av en kommentar i kommentarsfältet.
- ✓ Använder ni inte kontrollprogrammet för hCG-kontroller, sedan tidigare, vill vi gärna att ni börjar göra det nu. Vi hjälper er att komma igång.

Informationen om era kontroller och vilka LOT-nummer, på testen, som används är viktig information om något problem med testet skulle uppstå och vi behöver kontakta leverantören.

Extern kontroll: Samma som tidigare men *rapportgrupp behöver ändras* när det första resultatet med det nya testet registreras.

Hållbarhetstid, faeces-Hb

Art.nr 17321, Testkit F-Hb 20 kit/fp (Analyze F.O.B Test)

Notera att provet ska testas inom 7 dagar från provtagning

Kontakt

Tel. 090-785 25 24

Monika Francis, monika.Francis@regionvasterbotten.se

Sofie Grönlund, sofie.gronlund@regionvasterbotten.se

Ellie Gharouni, ellie.gharouni@regionvasterbotten.se

Sofia Johansson, sofia.g.johansson@regionvasterbotten.se

Biobanken norr**090-785 15 55**

Biobanken norr har följande öppettider dag före röd dag för mottagning av prov via rörpost:

Dag före Alla helgons dag 3 nov: 8-15

Trettondagsafton 5 jan 2024: 8-15

I övrigt gäller ordinarie tider dvs vardagar 8-16

Blodcentralen090-785 20 76

Beställningar av blodkomponenter, även akuta, bör i första hand göras elektroniskt via Interinfo. En beställning via Interinfo hanteras lika fort som den som inkommer via telefon. Elektroniska beställningar innebär dessutom att du som beställare slipper vänta i telefon vid hög belastning, underlättar för blodcentralen och är i flera avseenden säkrare. Du kan som beställare se när beställningen är mottagen och enheten reserverats.

Blodbeställningar via interinfo och telefonen med anknytning 52076 har högsta prioritet och vår målsättning är att alltid ge snabb service oavsett ärendetyp.

Vid frågor kontakta biträdande avdelningschef Jenny Käck telefon 090-785 37 28.

Klinisk genetik

090-785 28 00

Klinisk genetik

Benmärgsprover för kromosomanalys tas endast emot på fredagar eller dag före röd dag om frågeställningen är akut. Ring laboratoriet på 090-785 28 00 och meddela att ni tänker skicka ett benmärgsprov.

Öppettider: Vardagar 8–16, undantag dag före röd dag så stänger laboratoriet klockan 15.

För frågor, vänligen kontakta Klinisk genetik:

Klinisk Genetik
Laboratoriemedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 28 00
E-post: kliniskgenetik@regionvasterbotten.se



Analys av anti-titin läggs ner

Från och med 2023-09-15 avslutas analyser av antikroppar mot titin på klinisk immunologi. Detta pga avtagande efterfrågan.

Analysen ingår i panel neuronala antikroppar på bland annat Klinisk immunologi Karolinska universitetslaboratoriet och Sahlgrenska sjukhuset.