

Information vid hyra av Sängryggstöd Bedco

Detta informationsmaterial innehåller urklipp ur leverantören Invacares fullständiga bruksanvisning.

För att ta del av fullständig bruksanvisning så klickar du dig fram enligt nedanstående:

www.invacare.se

Produkter

Sängar och tillbehör

Sängbord & sängryggstöd

Bedco sängryggstöd Dokumentation

(klicka här) Bruksanvisning Bedco

Sängryggstöd

Allmänt

Avsedd användning


- För personer som behöver stöd för att resa sig till en sittande position eller som inte får ligga plant på rygg av medicinska skäl.
- Sängryggstödet är avsett för användning vid vård i hemmet och på sjukhem.
- Brukare med en maxvikt på 135 kg.
- Maxbelastning på sängryggstödet är 70 kg.

Sängryggstödet är inte avsett för:

- barn under 12 år eller patienter inom psykiatrin.


Monteringsanvisning

Placera sängryggstödet på sängen

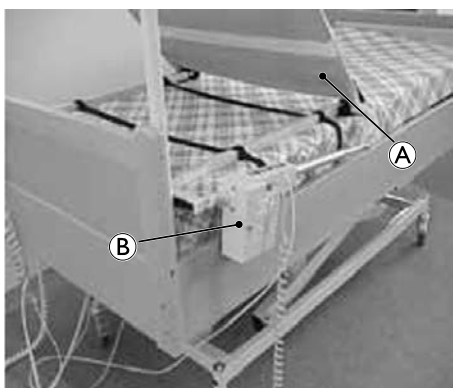


1. Placera sängryggstödet **A** vid sängens huvudände. Ryggstödet kan användas ovanpå eller under madrassen, beroende på vilken typ av madrass som används.
2. Placera motorn **B** bredvid madrassen.

Montera sängryggstödet

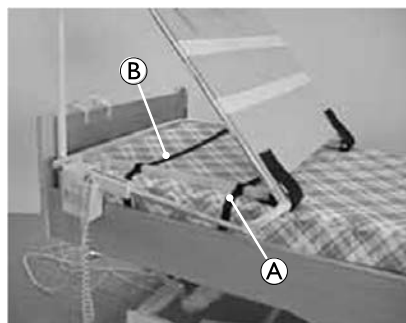

1. Placera det första spännbandet **A** så nära sängryggstödet gångjärn som möjligt.
2. Placera det andra spännbandet **B** så nära sängens huvudände som möjligt.
3. Om det är möjligt, dra spännbanden runt både sängramen och madrassen och dra åt dem. Var noga med att inte dra åt för hårt.


Justera ryggstödet vinkel

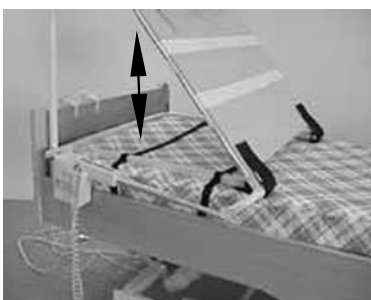

1. Tryck på uppåt- \uparrow eller nedåtpilen \downarrow på handkontrollen för att justera vinkeln på ryggstödet.
2. Släpp knappen när önskat läge har nåtts.

Montera motorn på den motsatta sidan

Motorn kan monteras antingen till höger eller till vänster om ryggstödet.

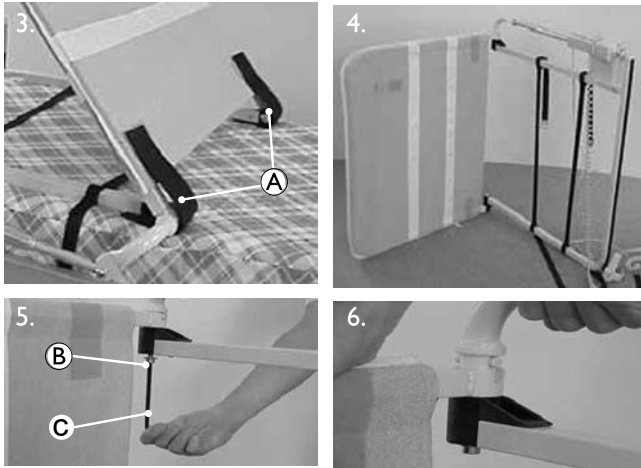

1. Lyft bort ryggstödet från sängen.
2. Med hjälp av handkontrollen reser du ryggstödet till det högsta läget.
3. Ta loss pivåledsskydden **A**.
4. Lägg ryggstödet på sidan med motorn uppåt.
5. Lossa skruv **B** med 6 mm-insexnyckeln **C**. Lossa bara skruvarna så mycket som behövs för att kunna rotera armen fritt.
6. Roterar armen 180 grader.
7. Upprepa steg 3–5 i omvänd ordning för att sätta ihop ryggstödet igen.
8. Placera ryggstödet på sängen igen.

Kontroll innan användning

- Kontrollera att spännbanden är åtdragna och inte är ivägen för rörliga delar.
- Kontrollera att sladdarna är rätt ditsatta och inte klämda.

Underhåll

Rengöring

- Canvasklädseln kan maskintvättas i max 60 °C. Detaljerade tvättanvisningar finns på textilskyddets etikett.
- Alla ryggstödsdelar utom de elektriska komponenterna kan rengöras med en fuktig svamp eller trasa.