

Information vid hyra av teleskopisk ramp

Detta informationsmaterial innehåller urklipp ur leverantören Kvistbergas fullständiga bruksanvisning. För att ta del av den fullständiga bruksanvisningen, läs på leverantörens hemsida:

www.kvistberga.se

Klicka fram till:

Produkter

Portabelt – Perfolight

Perfolight – U3

Bruksanvisning


Maxvikt: 125 kg/rampskena

Maxhöjd: 60 cm

Placera inte rampen för brant. Vid kraftig lutning, backa alltid personen i rullstol baklänges nedför rampen och kör personen framlänges uppför rampen.



På varje rampskena finns en dekal som anger med vilken maximal vikt ramperna får belastas. **Maxbelastningen är angiven per styck.** Ett **par** ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, under förutsättning att vikten är jämnt fördelad.

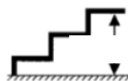

På varje rampskena finns det en dekal som anger vilken högsta nivåskillnad som ramperna är lämpliga för.



- Rampen får bara fällas ut när den nedre änden vilar mot marken.
- Ställ ner rampen. Frigör transportsäkringen på den teleskopiska delen. Dra sedan isär den teleskopiska delen till önskad längd.
- Placera ramperna med "läppen" stadigt vilande på det övre planet.
- Vid transport skjut ihop ramperna försiktigt till transportlängd, stäng transportsäkringen och bär rampen i handtaget.
- Håll ramperna rena från smuts och snö.
- Ramperna kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel som finns på marknaden. Högtryckstvätt rekommenderas.