

# Monteringsguide

## för Bodypoints bälten och selar

### Elektriska rullstolar

Detta är ett komplement till bruksanvisningen som medföljer produkten och visar monteringsförslag på manuella rullstolar, elrullstolar, arbetsstolar och hygienstolar som HEA Medical testat och som faller inom ramarna för vad tillverkarna anvisar. Vad en viss brukare behöver för god säkerhet, stabilitet och komfort kan kräva andra lösningar med hänsyn tagen till förmåga, förväntningar och miljö.

## Monteringsförslag av Bodypoints höftbälten och bröstselar på elektriska rullstolar

Oavsett om man behöver extra stöd för en funktionell vardag, eller säkerhet för att kunna tänja gränserna i ett aktivt liv erbjuds stora möjligheter med Bodypoints höftbälten och bröstselar. Men utan infästning ges ingen position. HEA Medical och Bodypoint erbjuder ett stort sortiment av fästdetaljer, både universella och specifika för vissa vanliga rullstolar. I stolens/bältets/selens bruksanvisning finns de generella anvisningarna från tillverkarna, CE-rättsinnehavarna. Här är förslag som HEA testat och som faller inom ramarna för vad tillverkarna anvisar. Men, vad en viss brukare behöver för god säkerhet, stabilitet och komfort kan kräva andra lösningar med hänsyn tagen till förmåga, förväntningar, miljö m.m.

Om Bodypoints positioneringshjälpmedel, som är CE-märkta enligt det Medicintekniska direktivet, provas ut och monteras av sakkunnig personal som följer rullstolens bruksanvisning och dessa råd och tips, som faller inom ramarna för Bodypoints bruksanvisningar, blir kombinationen inte en specialanpassning och all CE-märkning kvarstår.


## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Beslag och fästdetaljer	3
Eurovema DX Compact, DX Compact Junior	4
Eurovema Sitrite, Sitrite ABC, Miniflex Classic	5
Invacare Orion	6
Permobil Koala	7
Invacare Kite modulite, modulite Flex 3, Bora modulite	8-9
Mercado Real 6100 barn & vuxen, Vuxen plus 9000/9100, Barn plus 9000/9300/9400	10-11
Permobil C400, C500, K300, M400 PSJR, Corpus HD, X850, X850 TS, X850 TS Junior, F3, F5	12-13
Sunrise Medical Sterling Opal	14
Invacare Orion Metro	15
LB Medical Ichair mc2, Ichair mcS	16-17
LB Medical Ortocar & Minicrosser M1 Ergo 2	18
Minicrosser M1 Ergo komfort	19



En bröstsele eller bröstbälte **skall alltid** användas tillsammans med ett höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.

### Så trär du bandet genom Trekanten och söljan

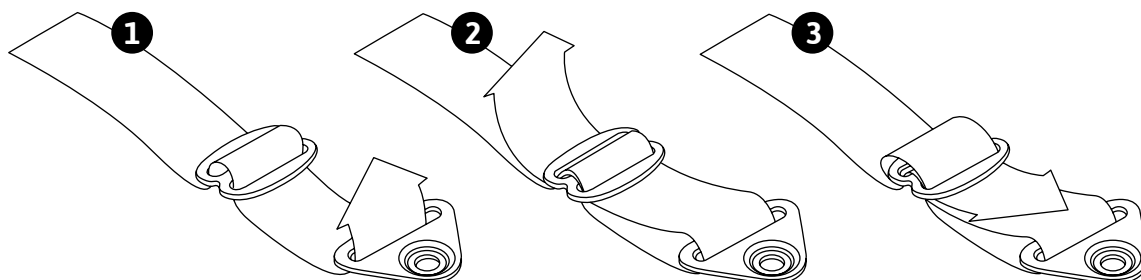

Trä först bandet genom söljan, därefter genom trekanten.

Trä sedan bandet tillbaka genom söljan.

Lås bandet genom att åter igen trä bandet genom söljan.


## Beslag & Fästdetaljer som använts i denna guide.



**Trekant, 6 mm hål,**  
25 mm Art.nr FS112  
37 mm Art.nr FS113  
50 mm Art.nr FS114



**Sölja,**  
25 mm Art.nr FS122  
37 mm Art.nr FS123  
50 mm Art.nr FS124

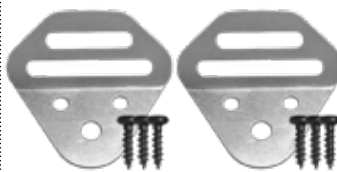

**Trehåls bandfäste**  
Art.nr 3702



**Monteringssats M8x25**  
Art.nr C115



**Monteringssats M6x30**  
skruv, låsmutter & bricka  
Art.nr C117



**Monteringssats M6x35**  
skruv & låsmutter  
Art.nr C119



**Monteringssats M8x35**  
skruv & låsmutter  
Art.nr C120



**Monteringssats M6x12**  
skruv, låsmutter & bricka  
Art.nr C121



**Monteringssats M6x16**  
skruv, låsmutter & bricka  
Art.nr C122



**Fästsats för profilskena med**  
10 mm öppningsvidd  
Art.nr HKA10



**Rörsvep Ø15 mm rör**  
Art.nr HKH31



## Monteringssatser för Etac Cross

### För bälte Small



**Trekant, 8mm hål, 25 mm**  
Art.nr FS112-8



**Monteringssats för Cross, 25 mm**  
Art.nr C112

### För bälte Medium



**Trekant, 8 mm hål, 37 mm**  
Art.nr FS113-8



**Monteringssats för Cross, 37 mm**  
Art.nr C113

### För bälte Large



**Trekant, 8 mm hål, 50 mm**  
Art.nr FS114-8



**Monteringssats för Cross, 50 mm**  
Art.nr C114

## 2-Punkts höftbälte



Fäst den medföljande trekanten med befintlig skruv som bilden visar. Lås med söljan.

---

## Detta behöver du



Medföljer bältet

## 2-Punkts höftbälte



Fäst Trehåls bandfäste med M6-bult i de gängade hålen under sitsen. Se Nedersta bilden på sidan.

### Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet



Art.nr C119

## 4-Punkts höftbälte



Fäst Trehåls bandfäste med M6 bult i de gängade hålen under sitsen. Se Nedersta bilden på sidan.

### Detta behöver du



2x Art.nr 3702



Medföljer bältet



2x Art.nr C119

## 4-Punkts höftbälte sedd underifrån



## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med armstödsfästets befintliga skruv. Lås med söljan.

### Detta behöver du



Medföljer bältet

## 4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten med armstödsfästets befintliga skruv. Lås med söljan.  
Framre band: Fäst Trehåls bandfäste med de medföljande träskruvarna under sitsen.  
Se Nedersta bilden på sidan.

### Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr 3702

## Montering sedd underifrån



### 2-Punktsmontering



Trekanten (art.nr C112, ingår ej) fästs i stolens befintliga hål med insex M8x16-bult.

#### Detta behöver du



Art.Nr C112

### Evoflex



Evoflex fästs i ryggens infästning hål med insex M8x16-bult.

#### Detta behöver du




Art.nr C123

### 4-Punktsmontering



Bakre band: Trekanten (art.nr C112) fästs i stolens befintliga hål med insex M8x16-bult.  
Främre band: Trekanten fästs i stolens befintliga hål med insex M6x16 och mutter.

#### Detta behöver du

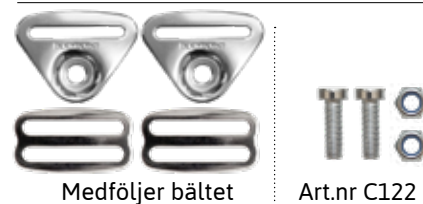

Medföljer bältet

Art.nr C122



Art.Nr C112

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena.

### Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKA10

## Evoflex



Fäst Evoflex med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena. Använd monteringsatsens bricka.

### Detta behöver du



Art.nr HKA10

## 4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena.

Främre band: Fäst trekanten med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena.

### Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HKA10



### Bröstsele - övre band



För stolar nackstöd så kan ett E-rör monteras.

### Detta behöver du



Art.nr 37619K

### Bröstsele - nedre band



Fästs trekanten i ryggstödsrörets gängade hål med M8- bult (medföljer ej).

### Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C120

### Monoflex



Lossa plattan på ryggens framsida. Fäst därefter trekanten med genomgående M6 bult och mutter i ryggens slits. Använd brickor för att distansera trekanten.

### Detta behöver du



Art.nr C117



Medföljer bältet

## 2-Punkts höftbälte



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träsisens undersida. Observera att endast bälten med 25mm och 37mm bandbredd passar i beslaget.

### Detta behöver du



Art.nr 3702




Medföljer bältet

## 4-Punkts höftbälte sedd underifrån



Fäst både bakre och främre band på valfritt avstånd med trehåls bandfäste på träsisens undersida. Observera att endast bälten med 25mm och 37mm bandbredd passar i beslaget.

### Detta behöver du

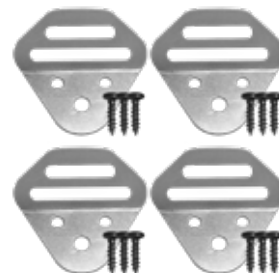

2x Art.nr 3702



Medföljer bältet

## Evoflex



Fäst med rörsvep runt armstödsfästets rör.

### Detta behöver du



Art.nr HKH31



Medföljer bältet

### Bröstsele - övre band



Använd Fäste för H-sele (Art.nr 804184). Beställs styckvis av Mercado Medic.  
Obs! Bilden visar bara hur ett av två fästen är monterat.

### Detta behöver du



Art.nr 804184

### Bröstsele - nedre band



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träryggens baksida.

### Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

### Monoflex



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träryggens baksida.

### Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

## 2-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult (medföljer ej).

### Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C121

## Evoflex



Evoflex fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult, mutter och bricka (medföljer ej).

### Detta behöver du



Art.nr C121

## 4-Punkts höftbälte



Bakre band: Trekanten fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult (medföljer ej).

Främre band: Trekanten fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult (medföljer ej).

### Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr C121

## Bröstsele - övre band



**Monteringsfäste bröstselar**  
Längd 150 mm Art.nr HW100-150-2  
Längd 200 mm Art.nr HW100-200-2

## Detta behöver du

---



**Adapter med fästdetaljer**  
Small Art.nr HW105S-1  
Large Art.nr HW105L-1

Använd Bodypoints monteringsfäste för bröstselars övre band.

## Bröstsele - nedre band



Fästs trekanten i ryggplattans befintliga skruv.

## Detta behöver du

---



Medföljer bältet

## Monoflex



Fäst trekanten i ryggplattans befintliga skruv.

## Detta behöver du

---



Medföljer bältet

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Detta behöver du

---



Medföljer bältet

## 4-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Detta behöver du

---



Medföljer bältet

## Montering sedd underifrån



Bakre band: Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Främre band: Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i hålet med M8 bult och mutter.

## Detta behöver du

---



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

## Evoflex



Fäst trekanten i hålet med M8 bult och mutter.

## Detta behöver du

---



Art.Nr C115

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med M8 bult och mutter.

### Detta behöver du



Passar bälte Small Art.Nr C112  
Passar bälte Medium Art.Nr C113  
Passar bälte Large Art.Nr C114

## 4-Punkts höftbälte




Fäst trekanten med M8 bult och mutter. Fäst den främre trekanten med M6 bult på sitsramens undersida.

### Detta behöver du



Passar bälte Small Art.Nr C112  
Passar bälte Medium Art.Nr C113  
Passar bälte Large Art.Nr C114

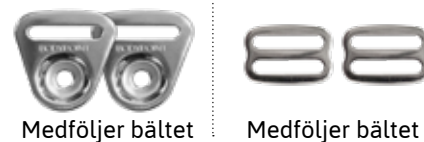

Medföljer bältet

Medföljer bältet

## Evoflex



Fäst bältet med M8 bult och mutter.

### Detta behöver du



Art.Nr C115



### Bröstsele - övre band



Montera ett E-rör med fäste för sexkantsrör på huvudstödsstolpen.

### Detta behöver du



Art.Nr 37612M

### Bröstsele - nedre band



Fäst trekanten med M6x10 mm bult i det nedersta av hålen i ryggstödsrören.

### Detta behöver du



Art.Nr C122



Medföljer selen

### Monoflex



Fäst trekanten med M6x10 mm bult i det näst översta hålet i ryggstödsrören.

### Detta behöver du



Art.Nr C122



Medföljer bältet

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i hålet med M8 bult.

### Detta behöver du

---



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

## Minicrosser M1 Ergo 2

---

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med den främre av armstödet bultar.

### Detta behöver du

---



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

## 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i sitsens befintliga bult. Val av monteringsats är beroende av bältets storlek.

### Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

## 4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten i sitsens befintliga bult. Val av monteringsats är beroende av bältets storlek.

Främre band: Använd Minicrossers C-skenebeslag (Art.nr SR-00022) och en M8-bult för att fästa trekanten i sitsens profilskena.

### Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114



Art.nr SR-00022



Medföljer bältet

## Evoflex



Fäst Evoflex i sitsens befintliga bult.

### Detta behöver du



ETT BÄTTRE LIV