



# Måttguide - Bodypoints bälten & selar

## Hur man mäter för ett vadderat höftbälte

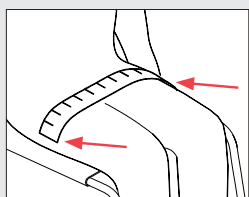


1. Bestäm en bekväm sittposition.
2. Mät hur lång den vadderade ytan bör vara med ett måttband (ytan som kommer att vara i kontakt med brukaren).
3. Välj bälte.

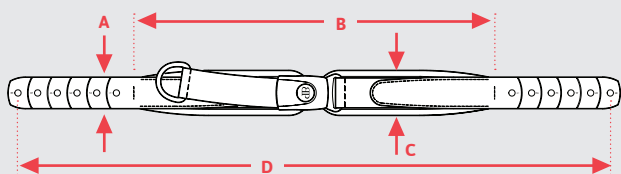


### Evoflex Höftbälte

Storlek	A	B	C	D
S38	25 mm	38 cm	5 cm	63 cm
M46	38 mm	46 cm	5,5 cm	76 cm
L62	50 mm	62 cm	7cm	96 cm

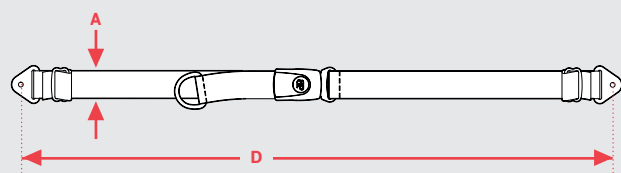


### Ovadderade höftbälten

Storlek	A	D
S	25 mm	117 cm
M	38 mm	142 cm
L	50 mm	155 cm
L-EXT	50 mm	206 cm

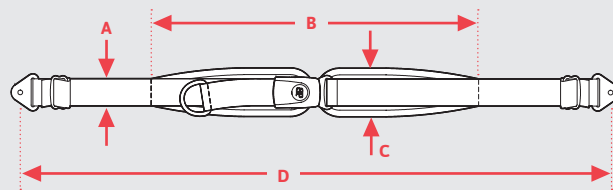

### Bälten med åtdrag från mitten

Storlek	A	B	C	D
S32	25 mm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	25 mm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	38 mm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M46	38 mm	46 cm	5,5cm	142 cm
L62	50 mm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	50 mm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	50 mm	92 cm	10 cm	206 cm

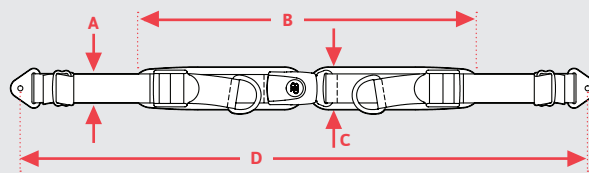


### Bälten med åtdrag från sidorna

Storlek	A	B	C	D
S38	25 mm	38 cm	5 cm	117 cm
M40	38 mm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	38 mm	46 cm	5,5 cm	142 cm

## Stayflex, PivotFit och Trimline Bröstselar


Mät från axel till axel.

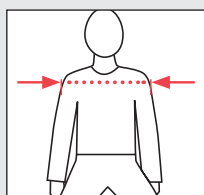

Storlek	Axelbredd
XS	24-28 cm
S	28-33 cm
M	33-41 cm
L	41-48 cm
XL	48-56 cm
Endast PivotFit:	
XXS	21-24 cm

## Monoflex Brösthälte


Mät över bröstkorgen där bröstbältet är tänkt att sitta.

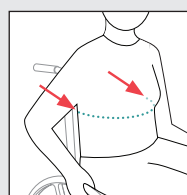

Storlek	Min/Max längd
XS	36-45 cm
S	46-55 cm
M	56-65 cm
L	66-75 cm
XL	76-85 cm

## Vadband och vadmattor


Mät från fotstödsrör till fotstödsrör som bilden visar.

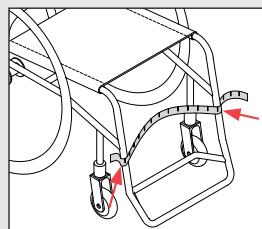

Storlek	Längd
S	35-40 cm
M	40-50 cm
L	50-61 cm

## Vristselar

Mät ovanför ankeln.

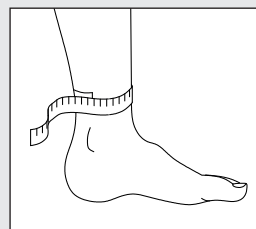

Storlek	Omkrets
XS	14-17 cm
S	17-20 cm
M	19-23 cm
L	22-29 cm
XL	28-33 cm