

Snabbguide

Analys av urinsticka – Multistix
Med användar-ID

1

Tryck på "Analysera sticka"



2


Skanna Användar-ID med streckkodsläsaren eller genom att trycka på siffror/bokstäver

Tryck "OK"



3

Tryck på "Ange ny patient"

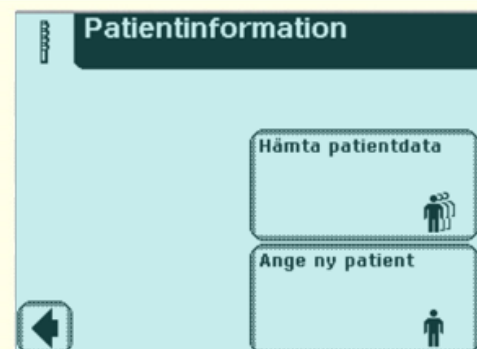

4

Skanna patient-ID med streckkodsläsaren eller genom att trycka på siffrorna/bokstäverna

Tryck på OK



Snabbguide

Analys av urinsticka – Multistix
Med användar-ID

5

Blanda provet och förbered stickan
Doppa urinstickan i provet och tryck
samtidigt på "START"



6

Dra stickan mot kanten på muggen/röret
för att avlägsna överskottsurin.

Läska av långsidan på stickan mot en bit
papper.

Placera stickan på släden.



7

Efter en minut är svaret klart och en
remsa skrivs ut

