

Snabbguide Analys av intern kontroll – Liquid QC DipStrip



Välj **Kvalitetskontroll**




Välj **Kontroll av sticka**




Skanna eller skriv in ditt HSA-ID och tryck sedan **OK**




Välj **Ange lot och utgångsdatum**

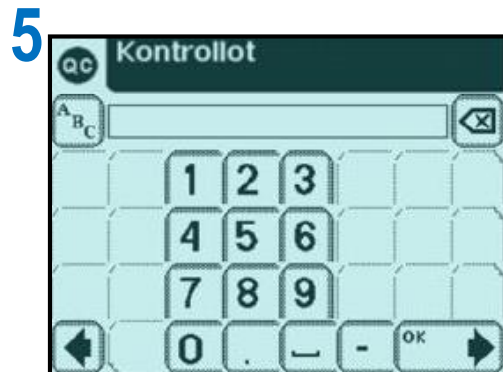

Skanna streckkoden på rör 1 och tryck sedan **OK**

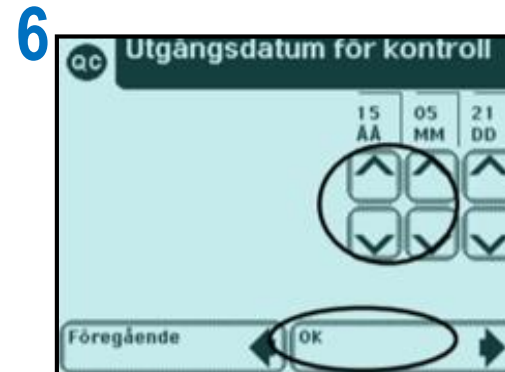

Ange utgångsdatum med pilarna och tryck sedan **OK**

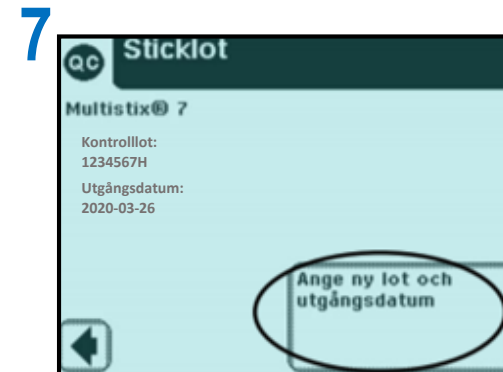

Tryck på **Ange ny lot och utgångsdatum**




Skanna in streckkoden från Multistix-burken


Snabbguide Analys av intern kontroll – Liquid QC DipStrip




Förbered sticka och kontroll 1
Tryck på **START** → doppa stickan
→ dra av stickan mot behållarens
kant → läska av och placera
stickan i släden

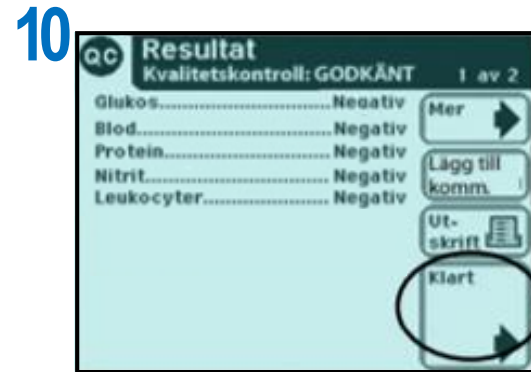


Skriv ut resultaten genom att
trycka på **Utskrift**
Kasta stickan och torka av släden
Tryck på **Klart**

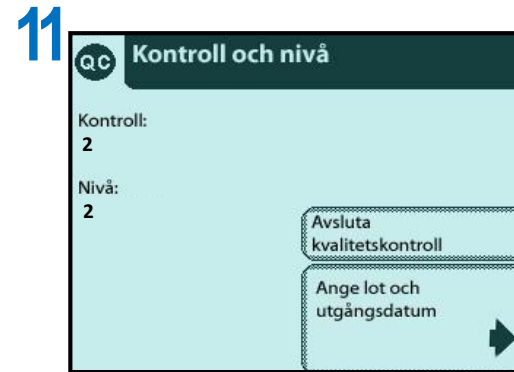

Välj **Ange lot och utgångsdatum**

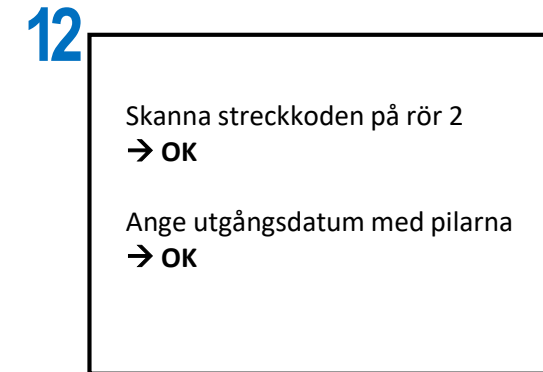


Upprepa steg 5 och 6

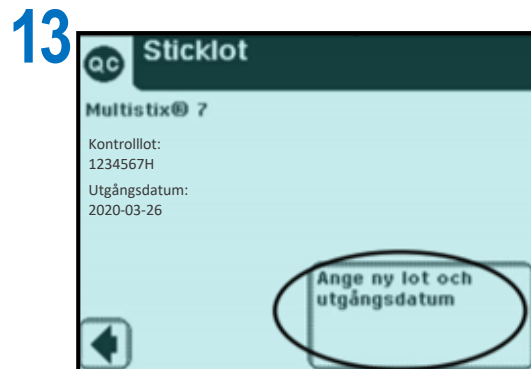


Tryck på **Ange ny lot och utgångsdatum**



Skanna in streckkoden från
Multistix-burken

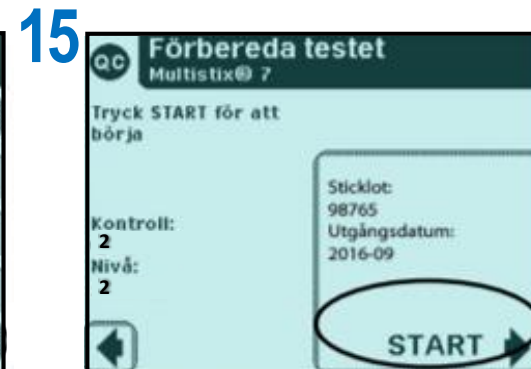

Förbered sticka och kontroll 2
Tryck på **START** → doppa stickan
→ dra av stickan mot behållarens
kant → läska av och placera
stickan i släden

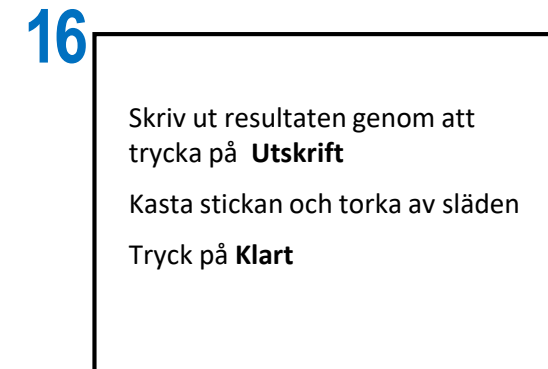

Upprepa steg 10

Skriv sedan in resultaten i ert kontrollprogram