

OSOM Strep-A

Sensitivitet: 96%
Specificitet: 97,80
Antal Test: 20/50
Artikelnr.: 11141, 11141-20
SKUP afprøvning
FDA godkend
Jönköping afprøvning

1 Droppa först 3 fritt fallande droppar av reagens 1 i provröret. Rosa färg.

2 Droppa därefter 3 fritt fallande droppar av reagens 2 i röret. Ljusgult färgomslag.

3 Ta provet med den medföljande provtagningspinnen. Blanda provet med reagenset genom att kraftigt röra runt provtagningspinnen i provröret minst 10 gånger. Vänta 1 minut. Tryck ihop provröret om provtagningspinnen och vrid ur all reagens. Kasta provtagningspinnen.

4 Placera en testremsa i provröret. Läs av resultatet efter 5 minuter.

Positiva resultat kan avläsas tidigare, när både en blå testlinje och en röd kontrollinje framträder.

5 Avläsning/resultat


Positivt:

En blå testlinje och en röd kontrollinje.

OBS: den blå testlinjen kan ha vilken blå nyans som helst. Ljusare eller mörkare än bilden

Negativt:


Endast röd kontrollinje

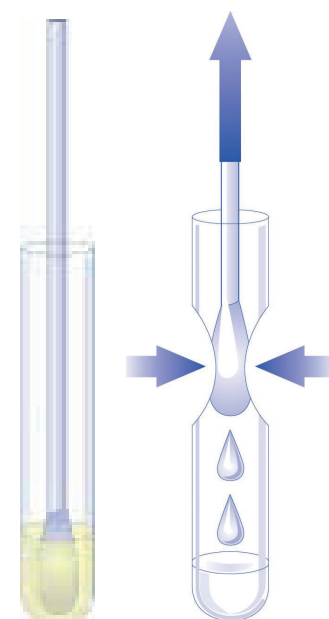

1 minut



5 minuter

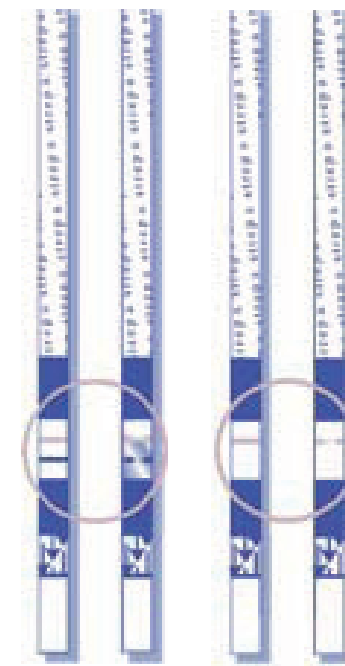

Positivt

Negativt



Kontakt, telefon

Medigroup Sverige:
010 510 2011

MediGroup, Danmark:
+45 4576 5425

MG
MEDIGROUP

www.osom.se