

Säkerhetsmeddelande: Q-Link 13; Adaptorsats LikoScale samt LIKO UNO 102 EE Mobile lyft

Art.nr. 40789, 37466 med flera

Några allvarliga incidenter har inträffat vid användning av lyftkomponenten Q-link 13, som vid felaktig fastsättning har lossnat med fallskador som följd. Q-link 13 används framför allt tillsammans med personvåg LikoScale där vågen monteras med snabbkoppling mellan lyft och lyftbygel. Det är viktigt att kontrollera att snabbkopplingen låser sig ordentligt efter montering av våg eller lyftbygel, den kan annars lossna vid lyft.

Hjälpmedel Västerbotten kommer successivt att byta ut komponenterna Q-link 13 till en version som inte kan sättas fast på ett felaktigt sätt.

Q-link 13 sitter framför allt på Mobil lyft UNO 102 EE men även på andra lyftar där man använder personvågen LikoScale. Observera att Hjälpmedel Västerbotten inte alltid har möjlighet att spåra de personvågar som inte tillhandahållits via oss. Tillverkaren Baxter kommer att kontakta er som köpt in vågar för vidare åtgärder.

För mer information:

Läkemedelsverket: [Q-Link 13; Adaptorsats LikoScale samt LIKO UNO 102 EE Mobile lyft](#)