



cobas h232: Utföra en Instrumentkontroll (IQC-test)




Slå på mätaren med On/Off-knappen

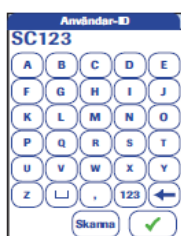


Skriv in eller scanna ditt användar-ID

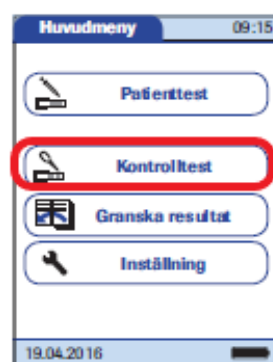


Välj Kontrolltest och tryck på den gröna boken under QC-status 




För in en av IQC-testremorna (High eller Low) när symbolen för testremsan visas

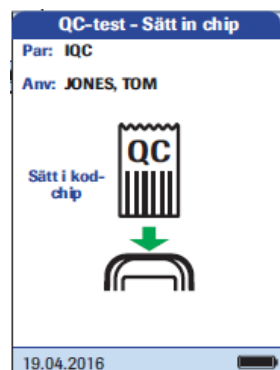

Om en ny lot med IQC-testremor används måste det nya kodchipet sättas in.

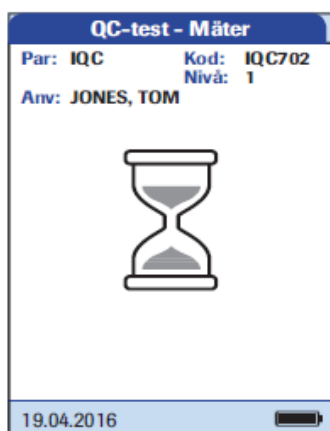

Timglasikonen visas och den interna kontrollen påbörjas

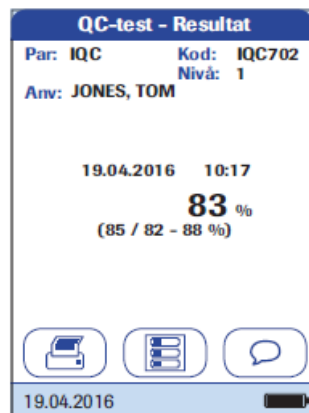

Resultatet visas med börintervallet under inom parentes. Resultat under eller över börintervallet markeras med en pil ner eller upp. En kommentar läggs till genom att trycka på 