


Analys av intern kontroll - Liquid QC DipStrip

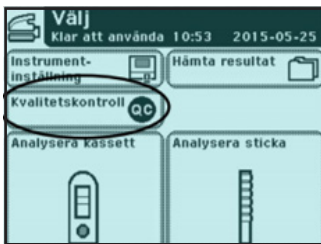

1. Välj Kvalitetskontroll.




2. Välj Kontroll av sticka.




3. Skanna eller skriv in ditt HSA-ID och tryck sedan OK.




4. Välj Ange lot och utgångsdatum.

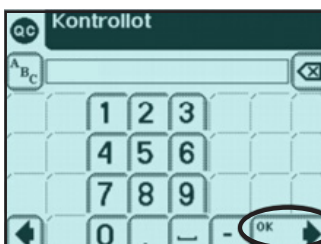

5. Skanna streckkoden på rör 1 och tryck sedan OK.

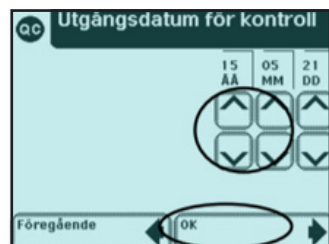


6. Ange utgångsdatum med pilarna och tryck sedan OK.

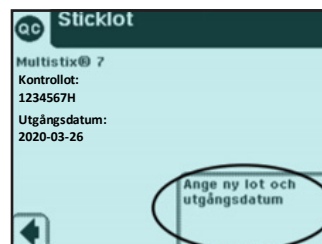


7. Tryck på Ange ny lot och utgångsdatum.



8. Skanna in streckkoden från Multistix-burken.

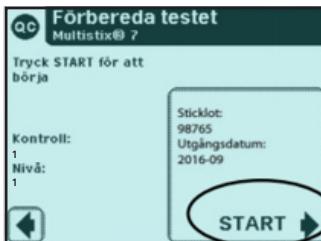


9. Förbered sticka och kontroll 1. Tryck på **START** → doppa stickan → dra av stickan mot behållarens kant → läska av och placera stickan i släden.

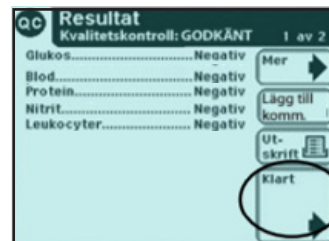

10. Skriv ut resultaten genom att trycka på **Utskrift**. Kasta stickan och torka av släden. Tryck på **Klart**.



11. Välj **Ange lot och utgångsdatum**.

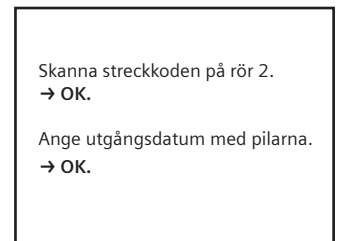


12. Upprepa steg 5 och 6.




13. Tryck på **Ange ny lot och utgångsdatum**.



14. Skanna in streckkoden från Multistix-burken.

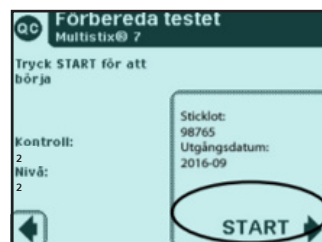

15. Förbered sticka och kontroll 2. Tryck på **START** → doppa stickan → dra av stickan mot behållarens kant → läska av och placera stickan i släden.

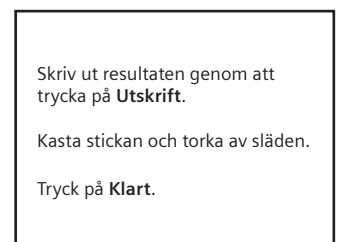

16. Upprepa steg 10. Skriv sedan in resultaten i ert kontrollprogram.