


HemoCue 201 DM


Snabbguide för analys av patientprov samt kontroll

Patienttest


- Tryck på knappen På/Av
- Dra ut kuvetthållaren
- När huvudmenyn visas är instrumentet redo
- Fyll och lägg i en kuvett, för in kuvetthållare i mätläge
- Resultat visas
- Tryck på OK för att lagra informationen

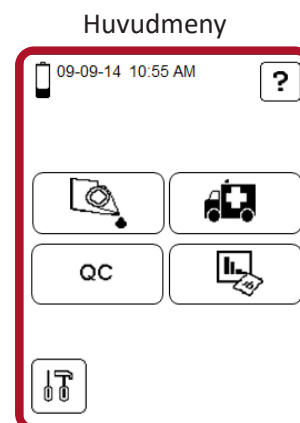

Dubbelprov (Hb kapillärt prov)

- Utför ett första Patienttest enligt ovan
*Obs! Tryck **inte** på knappen OK*
- Tryck på knappen Dubbelprov 
- Tryck på knappen OK för att godkänna resultatet av prov 1
- Fyll och lägg i nästa kuvett, för in kuvetthållaren i mätläge
- Resultat visas från båda mätningarna, x = medelvärdet på dessa två mätningar
- Tryck på OK för att lagra informationen.

Tillåten skillnad mellan mätningarna:
10 g/L
Vid större avvikelse ska ny provtagning göras

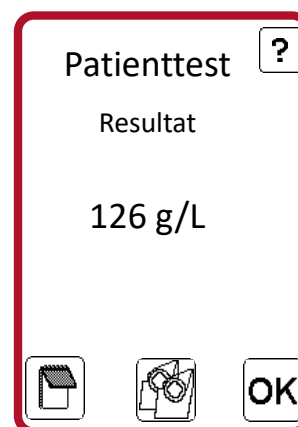

QC-test (internkontroll)

- körs som patienttest enligt ovan